



Profi-Desinfektionsvlies sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. **Profi-Desinfektionsvlies** Tücher sind mit der sehr schnell wirkenden Flüssigkeit des alkoholischen Präparats PROFI-SPRAY OFF getränkt (30 sec). Die Hygiene-Tücher eignen sich deshalb sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von Geräteoberflächen und Gegenstände im medizinischen Bereich und im patientennahen Umfeld zwischen Behandlungen und Eingriffen.

Anwendung

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und Pflegebereiche.

Profi-Desinfektions-Vlies ist gebrauchsfertig. Die zu reinigenden und zu desinfizierenden Gegenstände werden mit dem Tuch sorgfältig abgewischt und dabei vollständig benetzt.

Einwirkzeit: 30 sec. nach DGHM Richtlinie

Zur Beachtung: **Vorsicht bei alkoholempfindlichen Materialien!**

Eigenschaften

- Getränkt mit der Flüssigkeit von PROFI - SPRAY OFF
- Gebrauchsfertig
- schnell und umfassend wirksam
- wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, HCV/Vaccinia)
- rückstandsfrei
- Angenehmer Geruch
- Aldehyd frei
- sehr gute Materialverträglichkeit auch bei empfindlichen Materialien
- viruzid wirksam gemäß 14476 (Polio/Adeno)
- Noro-Viren getestet

Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten: 30 g 1-Propanol
15 g 2-Propanol
10 g Ethanol
0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat
0,02 g Alkylaminguanidindiacetat

Weitere Bestandteile: Duftstoffe, Nichtionische Tenside.

Chem.-Physik. Daten

pH-Wert: ca. 9-11
Dichte 20° C: 0,880 –1 g/cm³

Hinweis

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Zur Beachtung

Materialverträglichkeit überprüfen! Gefahr ernster Augenschäden.
Leichtentzündlich! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen (bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.) Schutzbrille Gesichtsschutz tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht für alkoholempfindliche Oberflächen wie Acrylglas und Reflektoren von Dental und Medicalleuchten aus Polycarbonatglas geeignet.

Edition

11/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.